



Prøvetagningsanvisninger – Humanprøver

Prøvetagningsglas til SERUM, BLOD og URIN kan rekvireres hos ALS Scandinavia.

Serum

Fyld glasset uden tilsætninger med ca. 3 ml blod. Lad blodet koagulerer ved stuetemperatur inden centrifugering. Efter centrifugering overføres serum til et syrevasket rør af plast.

Tænk på kontamineringsfaren, specielt for aluminium. For serumanalyser bør prøve rør til spormetal analyse anvendes.

Serum prøver kan fryses. β 2-mikroglobulin sendes helst i separat rør (kan fryses).

Blod

Fyld røret med heparin med ca. 4 ml blod. Vend røret mindst 5 gange.

For blodanalyser bør prøve rør til spormetalanalyse anvendes.

Blodprøver kan ikke fryses.

Urin

For urinprøver anvendes syrevaskede plastbeholder. Prøveudtagning gøres i slutningen af ugen efter arbejdstiden. På personer der ikke er i arbejde tages morgenurin.

Urinprøver kan fryses.